

## Bausch & Lomb Boston ADVANCE™ Cleaner

Denna bipacksedel innehåller viktig information. Läs innehållet noggrant och spara för framtida behov.

### Specifikt sammansatt för Stabila Gaspermeabla kontaktlinser i Fluoro Silikonakrylat och Silikonakrylat.

Daglig användning av BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ CLEANER motverkar uppbyggnad av besvärliga beläggningar, som försämrar bärkomforten med stabila gaspermeabla linser.

• Specifikt sammansatt för användning tillsammans med Bausch & Lomb Boston ADVANCE Comfort Formula Conditioning Solution.

**Innehåll:** Aktiv komponent: Alkylsulfat för ytrensning (8.0% w/v). Övriga ingredienser: Natriumklorid, natriumfosfat, icke-jonisk alkoholbaserad ytrensning, kiselgellosning; med titaniumdioxid.

### BRUKSANVISNING:

1. Tvätta dina händer innan du handskas med dina linser

2. Lagg linserna i din handflata, gnugga varsamt varje sida av linserna med några droppar Bausch & Lomb Boston Advance Cleaner i 20 sekunder.

3. AVLÄGSNA ALLA SPÅR AV CLEANERN GENOM ATT SKÖLJA NOGGRANT ENLIGT DE INSTRUKTIONER SOM DU FÅTT AV DIN KONTAKTLINSOPTIKER.

4. Lagg linserna i förvaringsetuier och fyll på med färsk Conditioning Solution så att linserna täcks. Förvaras under minst 4 timmar (eller över natt) innan du använder linserna igen.

OM DU AV EN HÄNDELSE SKULLE FÅ CLEANER I ÖGAT, TA UT LINSERNA OCH SKÖLJ GENAST ÖGAT MED RINNANDE KRYNKVATTEN TILLS CLEANERN ÄR HELT BORTSKÖJLD. OM DU KÄNNER OBEHAG, ÖKAT TÄRFLODE, SYNFÖRÄNDRINGAR, ELLER FÅR RÖDA ÖGAT, TA GENAST KONTAKT MED DIN KONTAKTLINSOPTIKER.

### Försiktighetsåtgärder:

- Återvänd aldrig vätskor.
- BLÖTLÄGG ALLTID LINSERNA I CONDITIONING SOLUTION. BLÖTLÄGG ALDRIG LINSERNA I CLEANER. SKÖLJ ALLTID LINSERNA NOGGRANT (SOM DIN KONTAKTLINSOPTIKER HAR INSTRUERAT DIG) EFTER RENGÖRING MED CLEANER OCH INNAN DU LÄGGER DEM I CONDITIONING SOLUTION.
- Låt aldrig flasktoppen komma i kontakt med något, eftersom detta kan kontaminera vätskan.
- Förslut flaskan ordentligt när den inte används.
- Tvätta och skölj alltid dina händer innan du handskas med dina linser.
- Använd före det utgångsdatum som står märkt på flaskan.

### Varning:

#### DENNA LÖSNING ÄR EJ AVSEDD FÖR ANVÄNDNING DIREKT I ÖGAT.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Använd inte efter utgångsdatum.

Använd inte produkten om förseglingen saknas eller är bruten.

Använd inte produkten om du är allergisk mot någon av komponenterna.

Kasta resterande vätska 3 månader efter att flaskan har öppnats för första gången.

EJ AVSEDD FÖR ANVÄNDNING TILL MJUKA KONTAKTLINSER.

## Bausch & Lomb Boston ADVANCE™ Cleaner

Tässä pakkauselosteessa on tärkeitä tietoja. Lue seloste tiedot huolellisesti ja säilytä seloste tulevaa tarvetta varten.

### Koostumus on suunniteltu happealäpäiseville koville piilolinssille, jotka on valmistettu fluorisilikoniakrylaattista tai silikoniakrylaattista.

Kun BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ CLEANER -puhdistusainetta käytetään päivittäin, linssiin ei jää vaikeita kerrostumia, jotka heikentävät happealäpäisevien kovien piilolinssien käyttökäytävyyttä.

• Suunniteltu käytettäväksi yhdessä Bausch & Lomb Boston ADVANCE Comfort Formula Conditioning Solution -hoitonesteen kanssa.

**Sisältö:** Vaikuttava aine: Alkylisulfaatti pintapuhdistusta varten (8,0% w/v). Muut ainesosat: Natriumkloridi, natriumfosfaatti, ei-ionipohjainen alkoholipitoinen pintapuhdistusaine, piigeeliliuos, jossa titaanioksidia.

### KÄYTTÖOHJE:

1. Pese kätesi ennen linssien käsittelyä.

2. Aseta linssi kämmenelle, hankaa varovasti linssin kumpaakin puolta muttamalla pisaralla Bausch & Lomb Boston Advance Cleaner -puhdistusainetta 20 sekunnin ajan.

3. POISTA KAIKKI PUHDISTUSAINETA JÄÄMÄT HUUHELEMALLA HUOLELLISESTI PIILOLINSIOPTIKOLTA SAAMIESI OHJEIDEN MUKAAN.

4. Aseta linssi säilytyskoteloonsa ja täytä se tuoreella säilytysnesteellä niin, että linssi peittyy. Linssijä on pidettävä vähintään 4 tuntia (tai yön yli) nesteessä ennen kuin linssijä käytetään uudelleen.

JOS PUHDISTUSAINETTA JOUTUU VAHINGOSSA SILMIIN, OTA LINSSIT POIS JA HUUHELE SILMIÄ HETI HANVADELLÄ, KUNNES PUHDISTUSAINETA ON KOKONAAN POISSA SILMÄSTÄ. JOS TUNNET OLOSI EPÄMIELIYYTÄVÄKSI, KYNNELERITYKSESI KASVAA, NÄKÖKYKYSI MUUTTUU TAI SILMÄSI ALKAVAT PUNERTAA, OTA HETI YHTEYTTÄ PIILOLINSIOPTIKKOON.

### Turvavaroitomioita:

- Älä käytä nesteitä koskaan uudelleen.
- SÄILYTÄ LINSSEJÄ AINA HOITONESTEESSÄ. ÄLÄ SÄILYTÄ LINSSEJÄ KOSKAAN PUHDISTUSNESTEESSÄ. HUUHELE LINSSEITÄ AINA HUOLELLISESTI (PIILOLINSIOPTIKON ANTIMIEN OHJEIDEN MUKAAN) PUHDISTUSNESTEELLÄ PUHDISTAMISEN JÄLKEEN JA ENNEN KUIN LAITAT LINSSEIT HOITONESTEeseen.
- Älä anna pullonkorkin koskaan koskettaa mitään, sillä neste voi tällöin pilaantua.
- Sulje pullo huolellisesti käytön jälkeen.
- Pese ja huuhtelee kätesi ennen linssien käsittelyä.
- Käytä ennen pullon merkittyä viimeistä käyttöpäivää.

### Varoitus:

#### TÄTÄ LIUOSTA EI OLE TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI SUORAAN SILMIIN.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Älä käytä tuotetta, jos sinetti on rikki tai puuttuu kokonaan.

Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen sen jollekin ainesosalle.

Hävittä jäljellä oleva neste 3 kuukautta sen jälkeen, kun pullo on avattu ensimmäisen kerran.

EI SAA KÄYTTÄÄ PEHMEIDEN PIILOLINSIEN YHTEYDESSÄ.



Bausch & Lomb Incorporated  
Rochester, NY 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated  
106 London Road, Kingston upon Thames,  
KT2 6TN, UK

Made in Italy

CE 0050



BOSTON ADVANCE is a trademark of  
Bausch & Lomb Incorporated.  
©Bausch & Lomb Incorporated

I31083442